

### Opsætning

Vælg den passende størrelse TrachSeal til ET/tracheostomi tube der skal anvendes, ifølge tabellen:


ET tube size	TrachSeal
● 5.0	F10
● 5.5	F10
○ 6.0	F12
○ 6.5	F12
● 7.0	F14
● 7.5	F14
● 8.0 and above	F16



Fjern kilen til at frakoble med, fra den fastmonterede hætte.



TrachSeal tilsluttes mellem ET/tracheostomi tuben og respirationssystemet ved hjælp af 22M/15F konnekteren på patientsiden.

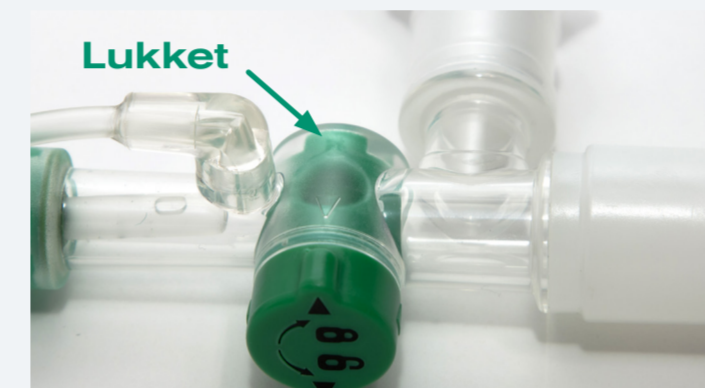

Vedhæft det medfølgende klistermærke, for at identificere, hvornår produktet skal skiftes.

#### 24 timers TrachSeal

Kode	Beskrivelse	Størrelse
● 3240003	Voksen endotracheal	F10
○ 3240000	Voksen endotracheal	F12
● 3240001	Voksen endotracheal	F14
● 3240002	Voksen endotracheal	F16
● 3240004	Voksen tracheostomi	F10
○ 3240005	Voksen tracheostomi	F12
● 3240006	Voksen tracheostomi	F14
● 3240007	Voksen tracheostomi	F16

#### 72 timers TrachSeal

Kode	Beskrivelse	Størrelse
● 3720003	Voksen endotracheal	F10
○ 3720000	Voksen endotracheal	F12
● 3720001	Voksen endotracheal	F14
● 3720002	Voksen endotracheal	F16
● 3720004	Voksen tracheostomi	F10
○ 3720005	Voksen tracheostomi	F12
● 3720006	Voksen tracheostomi	F14
● 3720007	Voksen tracheostomi	F16

#### 72 timers TrachSeal med saltvands (0,9%) ampuller

Kode	Beskrivelse	Størrelse
● 3720003	Voksen endotracheal	F10
○ 3721000	Voksen endotracheal	F12
● 3721001	Voksen endotracheal	F14
● 3721002	Voksen endotracheal	F16
● 3721004	Voksen tracheostomi	F10
○ 3721005	Voksen tracheostomi	F12
● 3721006	Voksen tracheostomi	F14
● 3721007	Voksen tracheostomi	F16


### Suge Procedure

1. Monter sugeslangen til sugetilslutningen på TrachSeal.
2. Sugets negative tryk må ikke overstige 150 mmHg.
3. Pre-oxygener patienten før sugning ifølge de lokale retningslinjer.

Ovenstående baseret på offentliggjorte AARC retningslinjer for klinisk praksis: Endotracheal sugning af mekanisk ventilerede patienter med kunstige luftveje 2010.



På 72 timers TrachSeal sugesættet åbnes isoleringsventilen ved at justere de to pile mod hinanden.

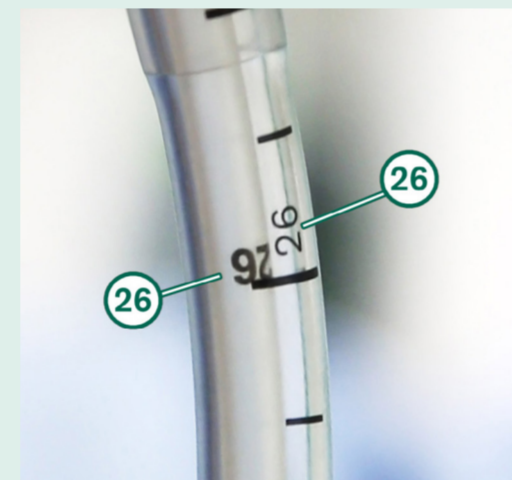

Før sugekateteret forsigtigt frem, indtil tallene på ET-tuben og tallene på sugekateteret er justeret med hinanden. Før derefter sugekateteret yderligere to centimeter frem.



Tryk sugeventilen ned og træk sugekateteret langsomt tilbage i ensartet bevægelse. Sugningen bør ikke overstige 15 sekunder.



Træk sugekateteret tilbage, indtil den sorte markør er synlig på den distale side, og du mærker et klik.



På 72 timers Tracheal sugesættet, lukkes isoleringsventilen efter sugning.

### Rengørings procedure



Åbn hættten på skylleporten, og monter et hætteglas eller sprøjte med saltvand. Tryk på sugeventilen for at aktivere den. Skyl indtil sugekateter spidsen er ren. Luk hættten på skylleporten, når du er færdig.



Det er vigtigt at låse sugeventilen når suge proceduren er færdig. Dette sikrer, at ventilen ikke trykkes ned ved et uheld, hvilket kan kompromittere ventilationen.

### Fjernelse



Brug den medfølgende frakoblings kile til at fjerne TrachSeal fra ET-tuben. Skub den mellem ET-tuben og TrachSeal og pres opad mod din tommelfinger. Kassér TrachSeal efter de lokale retningslinjer.

Brug patient monitorering under hele proceduren og følg de officielle kliniske suge retningslinjer.